

HIFUGOLD

High Intensity Focus Ultrasound



Yüz Germe ve Sıkılaştırma

Kaş Kaldırma


Kırışıklık Giderme

Çene Hattı Kaldırma

Boyun Sarkması Giderme




Hifu, non-invazif uygulamaya dayalı olmasından dolayı, cilt yüzeyine zarar vermeksizin, hedeflenen bölgede termal hasar oluşturma amaçlı geliştirilmiş en son teknolojidir. Ses dalgaları kullanılarak cildin alt katmanlarındaki kolojen üretiminin uyarımı sayesinde germe ve sıkılaşıma da en etkin sonuçlar elde edilebilir. Uygulama sonrasında yenilenme süreci hemen başlar. İlk anda dahi pozitif etkiler görülür fakat bu etki geçicidir. Gerçek sonuçlar 30 gün sonrasında belirgin hale gelir. 90 günün sonunda ise maximum seviyeye ulaşır.

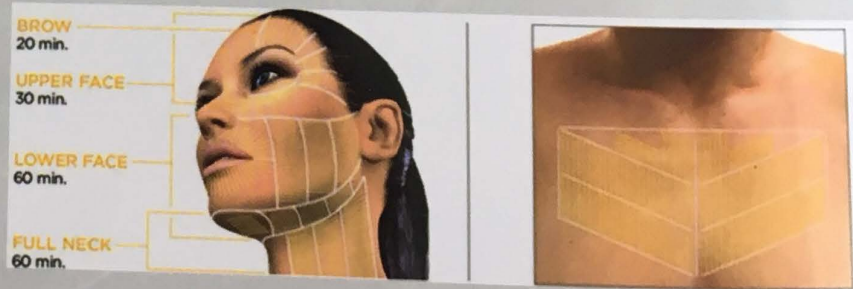


estedem
Medikal - Estetik - Kozmetik

www.estedem.com.tr


✓ Yanak

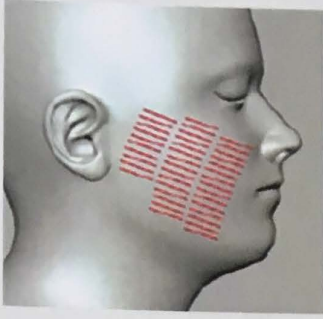


Protokol : 1 J / Aralık 2 mm / Uzunluk 30 mm
Uygulanacak hatlar : 70 - 80 hat

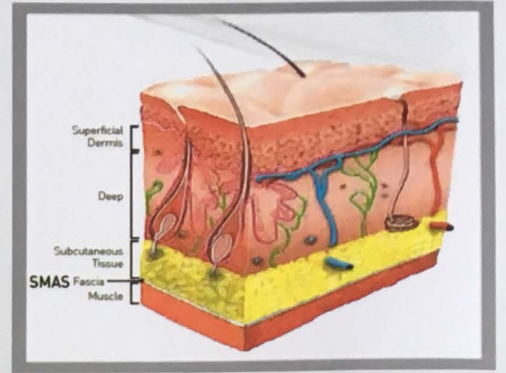


✓ Kaş

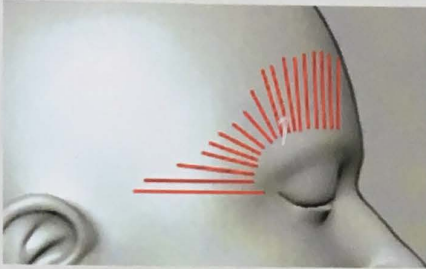


Protokol :
0.8 J / Aralık 2 mm / Uzunluk 30 mm
Uygulanacak hatlar :
30 - 40 hat

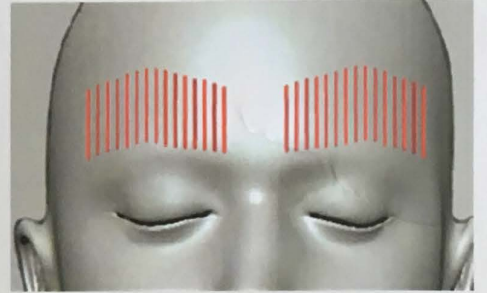

✓ Tüm Yüz

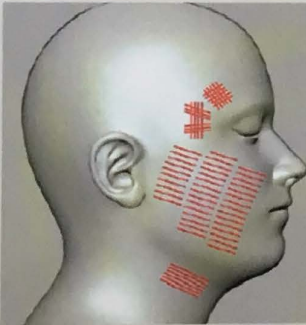

Protokol : 1 J / Aralık 2 mm / Uzunluk 30 mm
Uygulanacak hatlar : 400 - 500 hat

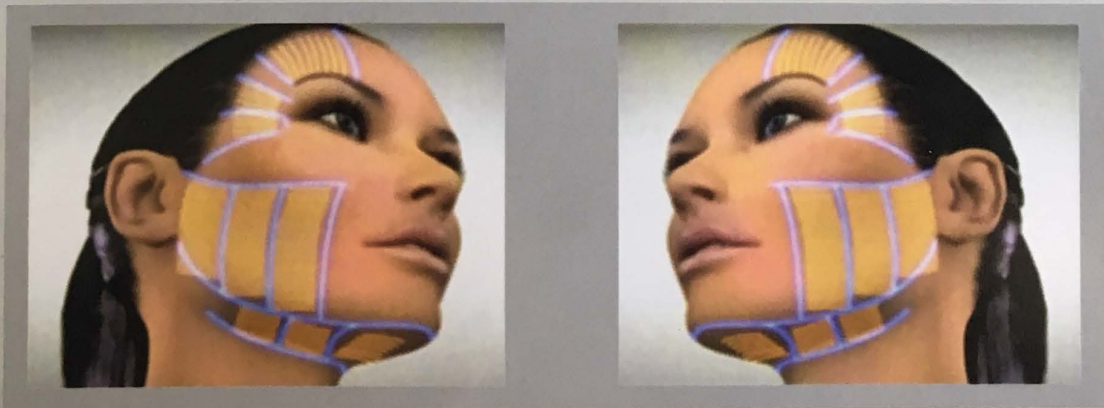

Alın : 3,0 mm (0,6 J) / 4,5 mm (0,7 J)
Yanak : 3,0 mm (0,7 J) / 4,5 mm (1,2 J)
Alt Çene : 3,0 mm (0,6 J) / 4,5 mm (1,2 J)

HIFUGOLD

Yüksek yoğunlukta odaklanmış ultrason

CE



Dokunmatik ekran

10 inc Dokunmatik Ekran

Takılı olan
kartuş

Hazır komutu

Atımlar arası
mesafe
ayarlanabilir


Atım
uzunluğu
ayarlanabilir

Anlık ve
toplam
atış sayısı

Bekleme
komutu



Operatör kendi hazırlayacağı
5 ayrı programı hafızaya alıp
ihtiyaçları doğrultusunda
kullanabilir

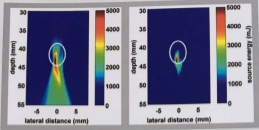

EN SON TEKNOLOJİLER EN İYİ FİYAT GARANTİSİ İLE
SİZİN İÇİN...


**Profesyonel teknolojiler sizin
için artık imkansız değil!**

2 yıl üretim hatalarına karşı ücretsiz garanti
Türkiye'nin her yerine 24 saatte teknik servis
Avrupa CE Birliği onaylı
Sertifikalı Eğitim

HIFUGOLD

Yüksek yoğunlukta odaklanmış ultrason

- Yüz Germe ve Sıkılaştırma
- Kaş Kaldırma
- Kırışıklık Giderme
- Çene Hattı Kaldırma
- Boyun Sarkması Giderme

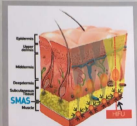

TECNICAL SPECIFICATIONS

Model : Hifugold H3

Kaynak : Hifu (High Intensity Focus Ultrasound)

Enerji : 0.1 J - 2 J

Kartuş : 3 mm 7 Mhz

4.5 mm 4 Mhz / 13 mm opsiyonel

Aralık : 2 mm / 3 mm / 4 mm

Atış Uzunluğu : 10 mm / 20 mm / 30 mm ayarlanabilir

Giriş Gücü : 110 V - 220 V

Ağırlık : 35 kg



estedem
Medikal - Estetik - Kozmetik

Tunalı Hilmi Cad. Bestekar Sok. 65/22 Kat:5 Çankaya/ANKARA
0(312) 468 20 82 - 84



info@estedem.com.tr

www.estedem.com.tr